


リングリムホルダー（1090100F）


CVmedica®

製品 ディスポーザブルタイプのリング付不織布安全帯


結び方（参考例）

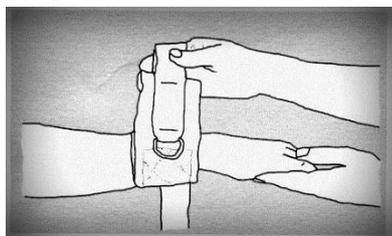


- ① リングの輪が外向きになるように患者の腕にのせる。

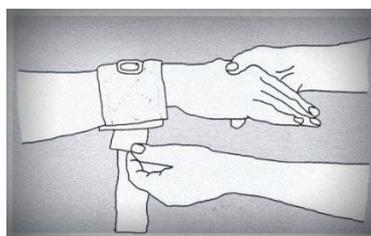

- ② 面ファスナーで固定し、腕に巻く長さを調節する。

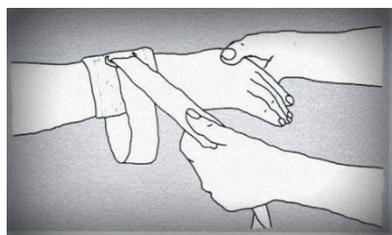

- ③ 紐を手首の下側から回し、回した紐をリングに通す。

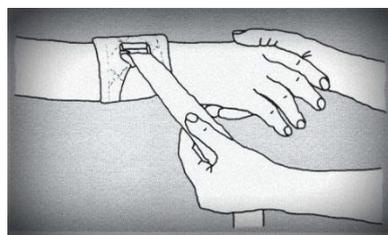

- ④ もう一度紐をリングに通して、きつすぎず、緩すぎないように調整し、もう一方を固定する。

材質

- 不織布・ストラップ部：ポリエステル
- パッド部：ポリウレタンスポンジ
- 面ファスナー部：ベルクロ
- リング部：ナイロン

使用上の注意

- 万一、製品の破損または異常が認められた場合には使用しないでください。
- 本品は、シングルパシエントユースの製品です。

保管方法 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温で保管してください。

使用期限 製造年月より5年（箱に記載）

包装単位 16本/箱、4箱/ケース

外国製造業者 C.V. Medica（所在地 スペイン）

販売元 株式会社インターメドジャパン

本取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。四肢固定または抑制以外の用途によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

CVH021