

AirLife™

InfuseIT®

Disposable and Reusable Pressure Infusors
InfuseIT ディスポーザブル／リ्यूーザブル 加圧バッグ

Striving
to be
**#1 IN PATIENT
SATISFACTION**



特長

- 360° 遠くからでも認識しやすい圧力ゲージ
- 300mmHg以下で使用（圧力上限に達すると弁が開放する安全機構付）




このラインで
目盛りを読む

初期位置


通常加圧

過剰加圧


- 操作が簡単

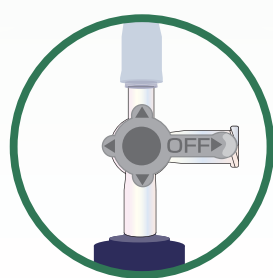

インフレーション

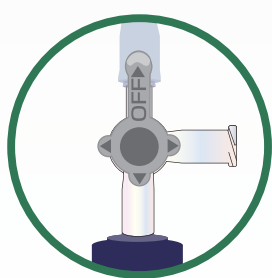

ホールド

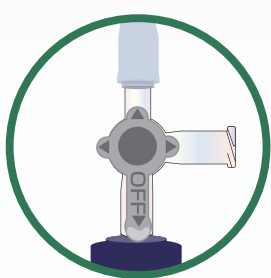

デフレーション



- 半透明スリーブで輸液の種類、残量確認が容易
- 清拭しやすいスリーブタイプ（リニューザブル）

洗浄方法

InfuseIT 加圧バック リニューザブルは下記のいずれかの方法で洗浄してください。

- 洗浄剤に軽く浸した柔らかい布もしくはクリーニングクロスを使用して本品全体を清拭する。
洗浄剤は下記を推奨する。

- * 10%希釈漂白剤(次亜塩素ナトリウム)
- * 病院が承認した洗浄剤

- 流水ですすぎ、自然乾燥させる。



浸漬洗浄
蒸気滅菌(オートクレーブ)
乾熱滅菌
EOG滅菌

製品情報

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
InfuseIT加圧バッグ	ZIT-500	500mL	10個/箱	※1
InfuseIT加圧バッグ	ZIT-1000	1000mL	10個/箱	※1
InfuseIT加圧バッグ リニューザブル	ZIT-520	500mL	1個/袋	※2
InfuseIT加圧バッグ リニューザブル	ZIT-1020	1000mL	1個/袋	※2

※1 一般的名称: 手動式圧注入調節装置 販売名: InfuseIT加圧バッグ 医療機器届出番号: 27B1X00002000026 クラス I

※2 一般的名称: 手動式圧注入調節装置 販売名: InfuseIT加圧バッグ リニューザブル 医療機器届出番号: 27B1X00002000027 クラス I

製造販売元

代理店



株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧下さい。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

S171211-2311-04-1000-004